
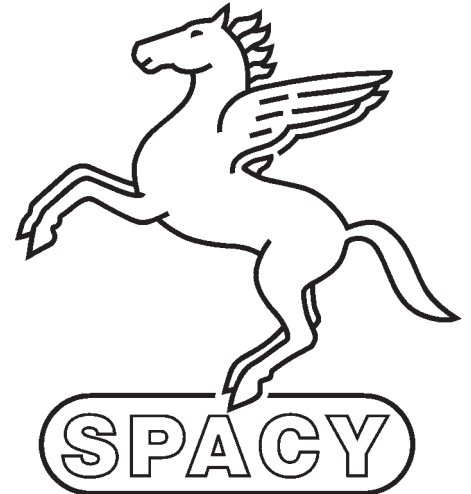


## Bitte Abstand halten!!

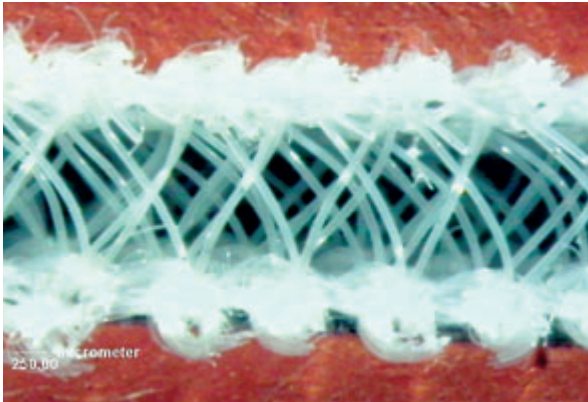


SPACY ist ein innovatives 3D-Abstandsgewirke mit erstaunlichen Polster- und Trageeigenschaften!

Zwischen zwei textilen Außenflächen befindet sich eine spezielle Struktur, die eine hohe Druckbeständigkeit aufweist. Durch Millionen miteinander verwirkter Kunstfasern erreicht SPACY eine enorme Sprungkraft und Stabilität.


Ideal für den Einsatz in der Diabetes-Versorgung aber auch überall dort, wo der Tragekomfort orthopädischer Behelfe verbessert werden soll!

Hier klebte ein Muster!  
Bitte gleich telefonisch anfordern!  
Kostenlose Hotline:  
0800-minke-11  
(0800-64653-11)

- **Polstereffekt** ohne Ermüdungserscheinungen
- SPACY wirkt temperatenausgleichend und isolierend durch **ständige Luftzirkulation** (Microklima)
- Höchste **Atmungsaktivität** (auch unter Druck!) und somit weniger Transpiration
- Kein direkter Kontakt zu anderen eingesetzten, nicht atmungsaktiven Polster- oder Werkstoffen, keine Ansammlung von Körperflüssigkeit
- SPACY ist abwaschbar und zusätzlich **antimikrobiell** ausgestattet

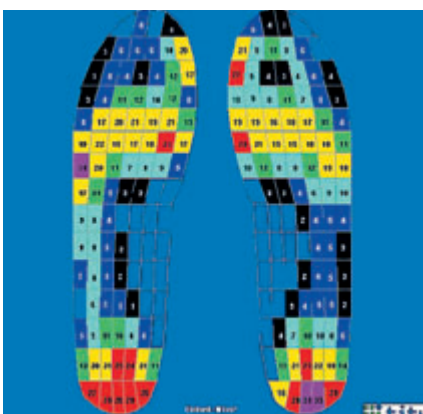

Optimale Auflagedruckreduzierung durch SPACY (Vergleich von digitaler Druckverteilungsmessung)

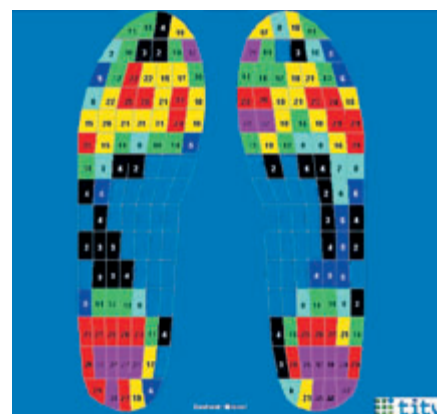



SPACY eignet sich nicht nur als Bezugs- und Polstermaterial für Bettungen (zusätzliche Belüftung des Fußes durch „Pumpeffekt“ beim Abrollvorgang!)



...sondern auch zur Verbesserung des Tragekomforts bei orthopädischen Behelfen (z. B. Nachtschienen)

## Und hier noch ein paar praktische Tipps:



Um ein Durchschlagen des Klebers zu vermeiden, sollte SPACY **nicht** mit Klebstoff eingestrichen werden. Einseitige Nassverklebung reicht völlig aus. SPACY bitte nicht anwalken, sondern von Hand auflegen und festdrücken.



Überstehende Kanten mit gebogener Schere beschneiden.



Für eine saubere Kante diese mit einem Feuerzeug vorsichtig „abflämmen“.

